

## Miesięczne soczewki kontaktowe EYEYE BIOXY

### W celu założenia soczewek miesięcznych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Zerwij folię z opakowania i delikatnie wyjmij soczewkę BIOXY. Przed kolejnym założeniem soczewki spłucz ją płynem lub solą fizjologiczną w celu usunięcia osadów.
- Umieść soczewkę BIOXY na opuszku palca wskazującego i upewnij się, czy soczewka nie wywinęła się na drugą stronę i czy nie jest uszkodzona.
- Środkowym palcem ręki trzymającej soczewkę odciągnij dolną powiekę, a środkowym lub wskazującym palcem drugiej ręki przytrzymaj górną powiekę.
- Delikatnie umieść soczewkę BIOXY na oku i powoli puść powieki. Mrugnij kilka razy.
- Powtórz te czynności, zakładając drugą soczewkę.

### W celu zdjęcia soczewek miesięcznych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Jeśli odczuwasz suchość oczu, użyj kropeł EYEYE Hydraclair przed ściągnięciem soczewek BIOXY.
- Przytrzymaj dolną powiekę, spójrz w górę a palcem wskazującym drugiej ręki zsuń soczewkę.
- Ostrożnie chwyć (uszczypnij) soczewkę BIOXY przy pomocy kciuka oraz palca wskazującego, a następnie ją wyjmij.
- W taki sam sposób postępuj z drugą soczewką BIOXY.
- Soczewki miesięczne BIOXY umieść w pojemniku. Prawą do części oznaczonej literą „R”, a lewą do części nieoznaczonej lub oznaczonej literą „L”. Soczewki zalej płynem do ich pielęgnacji, aby przeprowadzić proces ich czyszczenia.