

EYEYE I●COMFORT NOWOŚĆ!

Właściwe użycie EYEYE I●COMFORT jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

Preparat **EYEYE I●COMFORT** to nowy, wielofunkcyjny płyn, zawierający biopolimer Hialuronian, o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych.


Płyn **EYEYE I●COMFORT** poprawia nawilżanie oraz biotolerancję soczewek. Preparat przeznaczony jest do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania oraz nawilżania soczewek kontaktowych.



EYEYE I●COMFORT – Najnowszy płyn, który ochroni Twoje oczy i soczewki kontaktowe

Czynniki niezbędne do właściwej, codziennej pielęgnacji Twoich soczewek z wykorzystaniem płynu EYEYE I●COMFORT:

1. **Higiena:** Przed zdejmowaniem soczewek lub wyjmowaniem ich z pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym ręcznikiem. Możesz zastosować specjalny preparat dezynfekujący dłonie **EYEYE Sanilon**.
2. **Czyszczenie:** W przypadku wystąpienia dużych osadów białka i zanieczyszczeń umieść soczewki na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli **EYEYE I●COMFORT** na soczewki kontaktowe. Delikatnie pocieraj je palcem.
3. **Płukanie:** Przed dezynfekcją opłucz starannie soczewki kontaktowe płynem **EYEYE I●COMFORT**, po czym umieść je w pojemniku na soczewki.
4. **Dezynfekcja i przechowywanie:** wypełnij pojemnik płynem **EYEYE I●COMFORT**. Pozostaw soczewki kontaktowe w pojemniku na co najmniej 4 godziny.
5. **Zakładanie:** Wyjmij soczewki kontaktowe z pojemnika po zakończeniu cyklu ich dezynfekcji, opłucz je roztworem **EYEYE I●COMFORT** i załóż soczewki do oczu. Opłucz pojemnik na soczewki płynem lub solą fizjologiczną **EYEYE Saline**, pozostaw pojemnik do wyschnięcia na powietrzu.
6. **Nawilżanie:** Jeśli odczuwasz niewielkie podrażnienia podczas noszenia soczewek kontaktowych, zpuść do oka kroplę **EYEYE I●COMFORT** i kilkakrotnie zamrugaj. Możesz przy tym pozostawić soczewkę w oku. Jeśli podrażnienia nie ustąpią, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

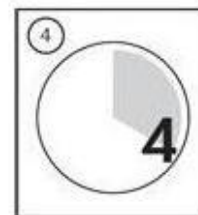

EYEYE I●COMFORT all in one – Nowoczesna ochrona Twoich oczu i soczewek kontaktowych

Przy użyciu płynu **EYEYE I●COMFORT** soczewki kontaktowe poddane są czyszczeniu oraz dezynfekcji podczas jednego procesu. System HydraFlex™ zawiera kombinację różnych składników, powodujących usuwanie z soczewek osadów białka. Zapewnia Twoim oczom głęboko kojące odczucie.

Unikalne połączenie 3 naturalnie wytwarzanych przez organizm składników płynu **EYEYE I●COMFORT** zapewnia najwyższy komfort noszenia soczewek:

- **Prowitamina B5** chroni, odżywia i wspomaga samoregenerację rogówki.
- **Karnozyna** jest najskuteczniejszym przeciwutleniaczem, który pomaga eliminować wolne rodniki, mogące niszczyć komórki rogówki, a nawet niweluje wczesne uszkodzenia.
- **Hialuronian** ochrania powłokę łzową i powoduje optymalne nawilżenie soczewek.

EYEYE I●COMFORT służy do przechowywania, czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, nawilżania. Ułatwia zakładanie soczewek oraz pielęgnuje oko... Wszystko w jednym!

EYEYE I●COMFORT – Zalecenia:

- Należy zużyć zawartość **EYEYE I●COMFORT** w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać **EYEYE I●COMFORT** po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać **EYEYE I●COMFORT** w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Należy zamykać butelkę **EYEYE I●COMFORT** bezpośrednio po użyciu.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z soczewkami kontaktowymi, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

Wskazówki przydatne odnośnie właściwego użycia soczewek oraz pojemnika na soczewki:

- Zaleca się używanie nowego pojemnika na soczewki kontaktowe po 3 miesiącach, aby był on czysty i wolny od bakterii.
- Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik roztworem **EYEYE I●COMFORT**, aby go zdezynfekować. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu. NIE osuszaj pojemnika ściereczką.
- Unikaj używania wody z kranu do soczewek oraz do pojemnika. Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
- Jeśli soczewki pozostają w roztworze płynu **EYEYE I●COMFORT** dłużej niż kilka dni, zaleca się ponowne zdezynfekowanie soczewek.

Skutki uboczne

Nie używać **EYEYE I●COMFORT** przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu!