

Jednodniowe soczewki kontaktowe EYEYE BIOXY Daily

W celu założenia jednodniowych soczewek kontaktowych BIOXY Daily wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Zerwij folię z opakowania i delikatnie wyjmij soczewkę BIOXY Daily. Przed kolejnym założeniem soczewki spłucz ją płynem lub solą fizjologiczną w celu usunięcia osadów.
- Umieść soczewkę BIOXY Daily na opuszku palca wskazującego i upewnij się, czy soczewka nie wywinęła się na drugą stronę i czy nie jest uszkodzona.
- Środkowym palcem ręki trzymającej soczewkę BIOXY Daily odciągnij dolną powiekę oka, a środkowym lub wskazującym palcem drugiej ręki przytrzymaj górną powiekę.
- Delikatnie umieść soczewkę na oku i powoli puść powieki. Mrugnij kilka razy.
- Powtórz te czynności zakładając drugą soczewkę BIOXY Daily.

W celu zdjęcia soczewek jednodniowych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Jeśli odczuwasz suchość oczu, użyj kropli EYEYE Hydraclair przed ściągnięciem soczewek BIOXY Daily.
- Przytrzymaj dolną powiekę, spójrz w górę, a palcem wskazującym drugiej ręki zsuń soczewkę.
- Ostrożnie chwyć (uszczypnij) soczewkę BIOXY Daily za pomocą kciuka i palca wskazującego, a następnie ją wyjmij.
- W taki sam sposób postępuj z drugą soczewką BIOXY Daily.
- Zużyte soczewki jednodniowe BIOXY Daily wyrzuć do kosza.