

## Jednodniowe soczewki kontaktowe EYEYE Daily UV

### W celu założenia soczewek jednodniowych BIOXY UV wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Zerwij folię z opakowania i delikatnie wyjmij soczewkę EYEYE Daily UV. Przed kolejnym założeniem soczewki spłucz ją płynem lub solą fizjologiczną w celu usunięcia osadów.
- Umieść soczewkę EYEYE Daily UV na opuszku palca wskazującego i upewnij się, czy soczewka nie wywinęła się na drugą stronę i czy nie jest uszkodzona.
- Środkowym palcem ręki trzymającej soczewkę EYEYE Daily UV odciągnij dolną powiekę oka, a środkowym lub wskazującym palcem drugiej ręki przytrzymaj górną powiekę.
- Delikatnie umieść soczewkę na oku i powoli puść powieki. Mrugnij kilka razy.
- Powtórz te czynności zakładając drugą soczewkę EYEYE Daily UV.

### W celu zdjęcia soczewek jednodniowych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Jeśli odczuwasz suchość oczu, użyj kropli EYEYE Hydraclair przed ściągnięciem soczewek EYEYE Daily UV.
- Przytrzymaj dolną powiekę, spójrz w górę, a palcem wskazującym drugiej ręki zsuń soczewkę.
- Ostrożnie chwyć (uszczypnij) soczewkę EYEYE Daily UV za pomocą kciuka i palca wskazującego, a następnie ją wyjmij.
- W taki sam sposób postępuj z drugą soczewką EYEYE Daily UV.
- Zużyte soczewki jednodniowe EYEYE Daily UV wyrzuć do kosza.