


EYEYE Crystal Cleaner

Środek czyszczący do twardych soczewek kontaktowych

Czynniki niezbędne do właściwej codziennej obsługi Twoich twardych soczewek z użyciem roztworu EYEYE Crystal Cleaner:

1. **Higiena:** Starannie umyj ręce, po czym osusz je czystym ręcznikiem. Możesz zastosować do mycia rąk żel antybakteryjny EYEYE Sanilon.
2. **Czyszczenie:** Połóż twardą soczewkę na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli płynu EYEYE Crystal Cleaner na soczewkę i delikatnie ją pocieraj przez 20-30 sekund.
3. **Płukanie:** Opłucz starannie soczewki twarde roztworem EYEYE EYEYE B5 Conditioner lub EYEYE B5 Active.
4. **Dezynfekcja i przechowywanie:** Wypełnij pojemnik roztworem EYEYE B5 Conditioner lub EYEYE Crystal Cleaner. Pozostaw soczewki w pojemniku na trwający co najmniej cztery godziny cykl ich oczyszczania.

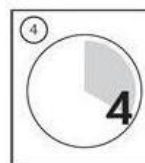

Środek EYEYE Crystal Cleaner

Właściwe użycie płynu EYEYE Crystal Cleaner jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

EYEYE Crystal Cleaner to preparat stosowany do wszystkich typów soczewek kontaktowych gazo-przepuszczalnych oraz twardych soczewek kontaktowych. Ze względu na unikalny skład skutecznie usuwa osady z powierzchni soczewek.

EYEYE Crystal Cleaner – Ostrzeżenia:

- NIGDY nie należy dopuścić do dostania się EYEYE Crystal Cleaner do oka!
- Nie używać preparatu EYEYE Crystal Cleaner po upływie terminu przydatności.
- Należy zużyć zawartość EYEYE Crystal Cleaner w ciągu 4 miesięcy od jej otwarcia.
- Wstrząsnąć przed użyciem.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Należy zamykać butelkę EYEYE Crystal Cleaner bezpośrednio po użyciu.
- Przechowywać butelkę w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Trzymać preparat EYEYE Crystal Cleaner poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku podrażnienia oczu należy natychmiast przestać używać roztworu EYEYE Crystal Cleaner oraz skonsultować się z okulistą lub optometrystą.

Skutki uboczne:

Nie używaj EYEYE Crystal Cleaner przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu.