

EYEEYE MonoSept

Właściwe użycie systemu EYEEYE MonoSept jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

Posługując się **EYEEYE MonoSept** pielęgnujesz soczewki prosto oraz bezpiecznie. System MonoSept skutecznie dezynfekuje soczewki kontaktowe.

Proces pielęgnacji soczewek kontaktowych odbywa się bez wykorzystania konserwantów. W pojemniczku został umieszczony specjalny platynowy dysk, który neutralizuje płyn EYEEYE MonoSept.

Po zakończeniu pełnego cyklu neutralizacji soczewki kontaktowe można ponownie założyć. System EYEEYE MonoSept można uzupełnić o zastosowanie tabletek usuwających białko, takich jak tabletki EYEEYE 3-N-Zym.




Uwagi odnośnie systemu EYEEYE MonoSept:

- Zawsze używaj TYLKO składników systemu EYEEYE MonoSept. NIE używaj składników innych systemów do pielęgnacji soczewek za wyjątkiem soli fizjologicznej przeznaczonej do opłukiwania soczewek oraz pojemnika lub kropli do nawilżania EYEEYE Hydraclair.
- Upewnij się, że nie zakładasz soczewek, które nie zostały w pełni zdezynfekowane. Nie zneutralizowany do końca płyn EYEEYE MonoSept może powodować pieczenie i silne odczucia podrażnienia oczu.
- Zneutralizowany płyn w pojemniczku NIE ma właściwości konserwujących. Jeśli soczewki kontaktowe pozostają w płynie EYEEYE MonoSept dłużej niż 24 godziny, zaleca się ich ponowne zdezynfekowanie.
- Należy unikać dotykania palcami platynowej płytki. Palce zostawiają ślady tłuszczu, obniżając skuteczność neutralizacyjną płytki.
- Wraz z otwarciem nowej butelki z płynem EYEEYE MonoSept należy zawsze użyć nowy pojemnik na soczewki EYEEYE MonoSept z platynowym dyskiem neutralizującym.
- Jeśli płyn EYEEYE MonoSept zostanie przypadkowo połknięty, należy natychmiast wypić dużą ilość wody oraz skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku przeciągających się podrażnień oczu skontaktuj się z lekarzem lub optometrystą.

EYEYE MonoSept - Unikalny system, który oczyszcza Twoje soczewki kontaktowe

Wskazówki prawidłowego używania systemu EYEYE MonoSept do dezynfekcji Twoich soczewek kontaktowych:

1. **Higiena:** Przed zdejmowaniem soczewek lub wyjmowaniem ich z pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym ręcznikiem. Możesz zastosować specjalny preparat dezynfekujący dłonie **EYEYE Sanilon**.
2. **Umieszczanie soczewek w koszyczkach pojemnika:** Włóż lewą soczewkę do sferycznego koszyczka oznaczonego literą L, następnie go zamknij. Włóż prawą soczewkę do prawego sferycznego koszyczka pojemnika, następnie go zamknij.
3. **Napełnianie pojemnika:** Wypełnij specjalny pojemniczek na soczewki płynem EYEYE MonoSept do zaznaczonego poziomu. UWAGA: płynu nie może być ani za mało, ani za dużo. W przypadku gdy płynu jest za dużo może się on spienić; gdy płynu jest za mało istnieje ryzyko skażenia soczewek. Należy zawsze używać świeżego płynu do każdorazowej dezynfekcji.
4. **Umieszczanie koszyczka w pojemniku:** Umieść koszyczek w pojemniczku, po czym zakręć go. Nie potrząśnij pojemniczkiem, ponieważ może to spowodować przyklejenie się cząsteczek nadtlenu wodoru do wewnętrznej części pojemniczka. Podczas zakładania soczewek kontaktowych cząsteczki te mogą spowodować silne pieczenie oczu. Należy wtedy natychmiast opłukać oczy dużą ilością czystej wody.
5. **Dezynfekcja i przechowywanie:** Pozostaw soczewki kontaktowe w preparacie **EYEYE MonoSept** na okres co najmniej sześciu godzin, a najlepiej na całą noc.
6. **Zakładanie:** Wyjmij soczewki kontaktowe z pojemniczka. Przed założeniem opłucz je roztworem soli fizjologicznej EYEYE Saline. Możesz je teraz założyć i nosić.
7. **Splukiwanie i suszenie pojemniczka:** Zawsze należy natychmiast wylewać zużyty płyn **EYEYE MonoSept**. Następnie dokładnie opłukać koszyczek, pojemniczek oraz platynową płytkę solą fizjologiczną **EYEYE Saline** lub płynem **EYEYE MonoSept**. NIGDY nie należy używać w tym celu wody! Opłukanie płytki jest niezbędne do usunięcia pozostałych zanieczyszczeń, które mogą zakłócić neutralizację płynu **EYEYE MonoSept**. Pozostaw pojemnik na powietrzu do wyschnięcia. NIE osuszaj go ściereczką.

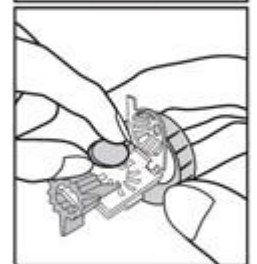

EYEYE MonoSept – Zalecenia:

- Należy zużyć zawartość butelki **EYEYE MonoSept** w ciągu 3 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać preparatu **EYEYE MonoSept** po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać butelkę **EYEYE MonoSept** w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Należy zamykać butelkę **EYEYE MonoSept** bezpośrednio po użyciu.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Trzymać preparat **EYEYE MonoSept** poza zasięgiem dzieci.
- Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
- Jeśli zalecono ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z soczewkami kontaktowymi oraz preparatem **EYEYE MonoSept**, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

Skutki uboczne

Nie używać **EYEYE MonoSept** przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu!