

EYEYE Hydraclair

Właściwe użycie kropli EYEYE Hydraclair jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

- Specjalne, nawilżające, odżywcze krople **EYEYE Hydraclair**, przeznaczone do oczu suchych, piekących, podrażnionych oraz zmęczonych.
- **EYEYE Hydraclair** dostępne są również jako ampułki jednorazowego użytku.
- Krople **EYEYE Hydraclair** w ampułkach nie zawierają konserwantów.



EYEYE Hydraclair - Krople do podrażnionych, suchych, zmęczonych oczu

Zalety kropli EYEYE Hydraclair:

- Krople **EYEYE Hydraclair** chronią oczy przed uczuciem suchości, podrażnieniami oraz zmęczeniem.
- Prowitamina B5 wzmacnia zdolność rogówki do samoodbudowy.
- Odpowiednie do wszystkich rodzajów soczewek kontaktowych.
- Krople **EYEYE Hydraclair** wchodzi w skład Eye Responsive Care System™.
- Oczy same decydują o zapotrzebowaniu na witaminę B5. Nigdy za dużo, ani za mało!
- Prowitamina B5 to naturalna substancja występująca w ludzkim ciele.
- **EYEYE Hydraclair** dobrze przylegają do rogówki, działając stabilizująco na film łzowy.
- Krople **EYEYE Hydraclair** zapewniają energię i nawilżanie przeciężonym oczom.

Krople EYEYE Hydraclair – Zastosowanie:

Odczuwanie swędzenia, pieczenia oczu lub ich zaczerwienienie oraz zmęczenie może być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak:


- Podrażnienia związane z noszeniem soczewek kontaktowych,
- Długotrwałe prowadzenie samochodu, motocykla lub innego pojazdu.
- Intensywne wpatrywanie się w ekran TV, komputera, tabletu, smartfonu.
- Klimatyzacja, wiatr, zanieczyszczenie powietrza, chlorowana woda z basenu, itd.

Krople do oczu EYEYE Hydraclair – Instrukcja użycia

Krople do oczu **EYEYE Hydraclair** można stosować na dwa różne sposoby: wkraplając je bezpośrednio do oczu lub poprzez naniesienie ich na soczewki kontaktowe przed ich założeniem.

Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Nie używać razem z lekami do oczu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nie należy używać w przypadku zakażenia oczu. W przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik zaprzestać używania kropli **EYEYE Hydraclair**!

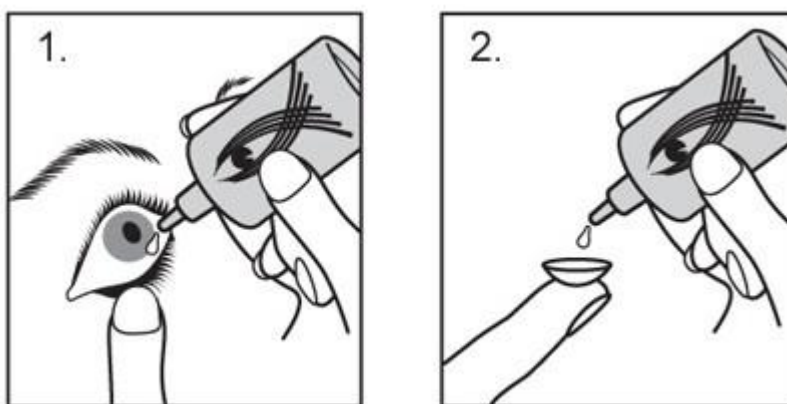

Aplikacja kropli EYEYE Hydraclair bezpośrednio do oczu:

Jeśli nosisz soczewki kontaktowe, możesz je mieć założone na oczach (rys. 1).

- Połóż palec wskazujący na dolnej powiece oka i lekko pociągnij powiekę w dół.
- Drugą ręką zbliz butelkę EYEYE Hydraclair nad dolną powiekę, nie dotykając nią oka!
- Wpuść 1 lub 2 krople, zamrugaj kilkakrotnie – roztwór równomierne pokryje powierzchnię oka.

Aplikacja kropli EYEYE Hydraclair przez soczewki kontaktowe:

Możesz użyć kropli przed założeniem soczewek na oczy (rys. 2).

- Połóż soczewkę kontaktową na środkowy palec.
- Wpuść 1 lub 2 krople **EYEYE Hydraclair** na soczewkę, następnie załóż soczewkę.
- Zamrugaj okiem 2 lub 3 razy – roztwór równomierne pokryje powierzchnię oka.