

# EYEYE Bioxy Wit B5 All-in-one

Właściwe użycie płynu EYEYE Bioxy Wit B5 All-in-one jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

EYEYE Bioxy Wit B5 All-in-one to płyn typu „Wszystko w jednym”, który został tak stworzony, aby połączyć łagodne, jednocześnie gruntowne czyszczenie soczewek, zapewniając doskonałą pielęgnację oczu:


- czyszczenie i dezynfekcja w ciągu 4 godzin,
- usuwanie uporczywego osadu białkowego,
- powolne uwalnianie witaminy B5 z soczewki w celu wzmocnienia zdrowia rogówki.



## EYEYE Bioxy Wit B5 All-in-one - Wszystko w jednym dla Twoich oczu i soczewek kontaktowych

### Czynniki niezbędne do właściwej, codziennej pielęgnacji Twoich soczewek z wykorzystaniem płynu EYEYE Bioxy Wit B5:

1. **Higiena:** przed zdejmowaniem soczewek kontaktowych z oczu lub wyjęciem ich z pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym ręcznikiem albo zastosuj specjalny preparat dezynfekujący dłonie **EYEYE Sanilon**.
2. **Czyszczenie:** w przypadku wystąpienia dużych osadów białka lub zanieczyszczeń umieść soczewki na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli roztworu **EYEYE Bioxy Wit B5 All-in-one** na soczewki. Delikatnie pocieraj je palcem.
3. **Płukanie:** przed dezynfekcją opłucz starannie soczewki płynem **EYEYE Bioxy Wit B5 All-in-one**, po czym umieść je w pojemniku na soczewki.
4. **Dezynfekcja i przechowywanie:** wypełnij pojemnik roztworem **EYEYE Bioxy Wit B5 All-in-one**. Pozostaw soczewki w pojemniku na co najmniej 4 godziny.
5. **Zakładanie:** wyjmij soczewki z pojemnika po zakończeniu cyklu ich dezynfekcji, opłucz je roztworem **EYEYE Bioxy Wit B5 All-in-one** i załóż soczewki do oczu. Opłucz pojemnik na soczewki płynem lub solą fizjologiczną **EYEYE Saline**, pozostaw pojemnik do wyschnięcia na powietrzu.
6. **Nawilżanie:** jeśli odczuwasz niewielkie podrażnienia podczas noszenia soczewek kontaktowych, zpuść do oka kroplę **EYEYE Bioxy Wit B5 All-in-one** i kilkakrotnie zamrugaj. Możesz przy tym pozostawić soczewkę w oku. Jeśli podrażnienia nie ustąpią, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

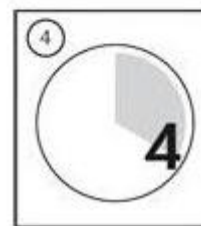

# EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one – Zalecenia:

- Należy zużyć zawartość butelki **EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one** w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać **EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one** po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać butelkę **EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one** w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Należy zamykać butelkę **EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one** bezpośrednio po użyciu.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Trzymać płyn **EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one** poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z soczewkami kontaktowymi oraz **EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one**, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

## Wskazówki przydatne odnośnie właściwego użycia soczewek oraz pojemnika na soczewki:

- Zaleca się używanie nowego pojemnika na soczewki kontaktowe po 3 miesiącach, aby był on czysty i wolny od bakterii.
- Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik roztworem **EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one**, aby go zdezynfekować. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu. NIE osuszaj pojemnika ściereczką.
- Unikaj używania wody z kranu do soczewek oraz do pojemnika. Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
- Jeśli soczewki pozostają w roztworze płynu **EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one** dłużej niż kilka dni, zaleca się ponowne zdezynfekowanie soczewek.

## Skutki uboczne

Nie używać **EYEE Bioxy Wit B5 All-in-one** przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu!