

Miesięczne soczewki kontaktowe EYEYE SIL LENS 150 do dziennego noszenia

W celu założenia soczewek miesięcznych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu.
- Zerwij folię z opakowania i delikatnie wyjmij soczewkę SIL LENS 150
- Przed kolejnym założeniem soczewki spłucz ją płynem lub solą fizjologiczną w celu usunięcia osadów.
- Umieść soczewkę SIL LENS 150 na opuszku palca wskazującego i upewnij się, czy soczewka nie wywinęła się na drugą stronę i czy nie jest uszkodzona.
- Środkowym palcem ręki trzymającej soczewkę odciągnij dolną powiekę, a środkowym lub wskazującym palcem drugiej ręki przytrzymaj górną powiekę.
- Delikatnie umieść soczewkę SIL LENS 150 na oku i powoli puść powieki. Mrugnij kilka razy.
- Powtórz te czynności, zakładając drugą soczewkę.

W celu zdjęcia soczewek miesięcznych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu.
- Jeśli odczuwasz suchość oczu, użyj kropli EYEYE Hydraclair przed ściągnięciem soczewek SIL LENS 150.
- Przytrzymaj dolną powiekę, spójrz w górę a palcem wskazującym drugiej ręki zsuń soczewkę.
- Ostrożnie chwyć (uszczypnij) soczewkę SIL LENS 150 przy pomocy kciuka oraz palca wskazującego, a następnie ją wyjmij.
- W taki sam sposób postępuj z drugą soczewką SIL LENS 150.
- Soczewki miesięczne SIL LENS 150 umieść w pojemniku. Prawą do części oznaczonej literą „R”, a lewą do części nieoznaczonej lub oznaczonej literą „L”. Soczewki zalej płynem do ich pielęgnacji, aby przeprowadzić proces ich czyszczenia.